ぎょう 虫 卵 検 査

ぎょう虫卵検査とは透明なセロファンテープを肛門周囲にしっかりと貼り付けて、肛門周辺に産み落とされた卵を2日間採取し(2日採卵法)、顕微鏡でぎょう虫の卵を見つける検査法です。

● 検査資材

児童生徒用	学校用
① ぎょう虫卵検査シート(セロファンテープ)	① 予備資材
② ぎょう虫卵検査シートを入れる紙小袋	② 検査対象者名簿

● 採取方法

- 1)検査シートは「1日目」と「2日目」の2日間、2回に分けて使います。
- 2)ぎょう虫は夜間に肛門から体外に出てきて肛門周囲に卵を産み付ける為、朝起きてすぐ用便前に肛門にしっかりあててください。
- 3) 「1 日目」のカバーフィルムを開き、まるいのりがついている部分を肛門にしっかりとあて、強く 2~3 回おしあてて(こすらないこと)元通り本体にカバーフィルムを戻します。
- 4) 「2 日目」も同じようして使い、カバーフィルムをはがし捨てて、まるい輪どうしをぴったりと貼り合わせてください。

回収時のお願い

- 1) セロファンテープは袋に入れたまま番号順に揃えて、クラス単位に輪ゴムでまとめてください。
- 2) セロファンテープは採取後、1週間程度は保存が可能ですが、保管の際には高温や乾燥しないよう注意してください。
- 3) 提出日の数日前より回収を開始し、当日は全員分が揃うようご協力をお願いいたします。

● 二次検査について

二次検査は、一次検査で陽性になった場合に実施します。薬物駆除を行った後、二週間ほどしてから実施し、着払い封筒にて当会に送付してください。

<ぎょう虫の駆除>

- ① 医師または薬剤師にご相談の上、ぎょう虫駆虫薬を服用して下さい。
- ② ぎょう虫駆除薬は卵には効きません。卵から成虫になる期間を考慮して 1回目の服薬後2週間から3週間後にもう一度服薬することでほぼ完全に駆虫されます。
- ③ ぎょう虫は1人被患者がいると家族にも感染していることがよくあります。家族全員の駆虫をお薦めします。